

Manual de uso



Almacenamiento y transporte



TECNOSALUD
EXPERTOS en soluciones para
Farmacias y Hospitales



Cuando use nuestros equipos es importante prevenir el riesgo de accidentes y lesiones personales. Siga estas recomendaciones básicas de seguridad y siempre aplique el sentido común.

- Asegúrese de leer y entender las instrucciones en su totalidad antes de utilizar el equipo.
- Guarde este manual, podrá serle de utilidad en un futuro.
- Haga caso de las indicaciones que incluyen los equipos.
- No opere ningún equipo que evidencie un mal funcionamiento o que presente daños en sus partes, comuníquese con el servicio técnico de Tecnosalud de inmediato.
- Si el equipo cuenta con ruedas, mantenga el freno activado. Libérela solo al momento del desplazamiento.
- Si va a desplazar el equipo, active y verifique el bloqueo de los seguros correspondientes a partes móviles.
- Mantenga atención sobre los movimientos efectuados por los productos, hacerlo de forma desatendida puede ocasionar lesiones
- No modifique, ni intente reparar ninguna de las piezas del equipo.
- Nunca intente subirse total o parcialmente sobre un equipo.
- Tenga siempre presentes las cargas máximas permitidas por los equipos.
- Nunca permita que los equipos sean operados por niños.
- No ubique los equipos a la intemperie.
- No exponga los equipos a altas temperaturas, luz solar directa o humedad extrema.
- Utilice el equipo únicamente para darle el uso para el que fue creado.



Carga máxima por entrepaño AXYS 100

La carga máxima de los entrepaños en este producto es de 20kg. Nunca exceda este límite.

Bloqueo de ruedas

Sostenga el equipo firmemente con ambas manos y utilice el pie para presionar el pedal ubicado en la parte superior de la rueda. Asegúrese de bloquear ambas ruedas antes de soltar el equipo. Para quitar el bloqueo, presione el pedal bloqueado mientras sostiene firmemente el equipo.



Desplazamiento del equipo

Con ambas manos, sostenga firmemente la estructura de aluminio del equipo en la posición más cómoda para su altura. Asegúrese de que el bloqueo de las ruedas ha sido liberado antes de empezar a desplazar el equipo.



Manipulación de los contenedores AXYS

Con ambas manos, sostenga firmemente el contenedor tomándolo de sus extremos. Nunca exceda la carga máxima de 20kg por contenedor.



Extracción de entrepaños

Con las ruedas del equipo completamente bloqueadas, tome firmemente el entrepaño que desea extraer con su mano izquierda. Coloque su pulgar derecho en la endidura del bloqueo automático (naranja) y eleve el entrepaño.

Cierre de entrepaños

Con las ruedas aseguradas, empuje el entrepaño hacia el interior del equipo hasta que se bloquee el entrepaño. Verifique el proceso halando el entrepaño, si este falla, repita el proceso hasta que el entrepaño quede completamente bloqueado.






Carga máxima por entrepaño AXYS 200

La carga máxima de los entrepaños en este producto es de 40kg. Nunca exceda este límite.

Inclinación de contenedores

Hale el contenedor a lo largo de los rieles en el entrepaño. Presione la parte frontal del contenedor suavemente hacia abajo elevando su parte trasera hasta que este choque con el tope superior. Para volver a la posición original, simplemente empuje el contenedor hacia el interior del equipo asegurándose de que este encaje sobre los rieles del entrepaño.



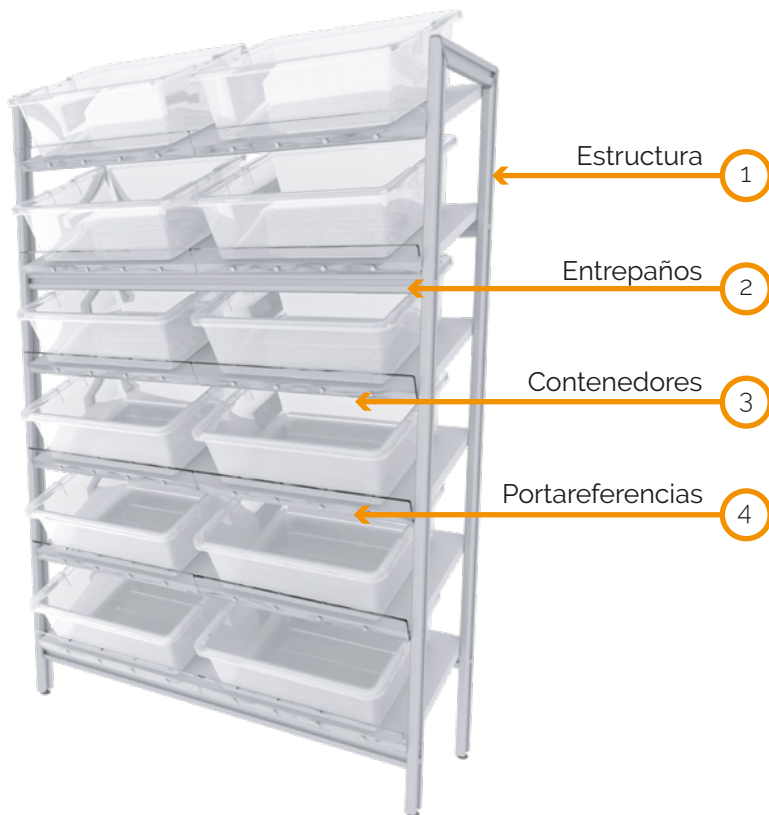

Carga máxima por entrepaño AXYS 200i

La carga máxima de los entrepaños en este producto es de 40kg. Nunca exceda este límite.

Portareferencias

Introduzca un identificador dentro del portareferencias frente al elemento que desea identificar.

Limpieza

Interior del producto

- Realice la limpieza de cada cajón o entrepaño individualmente.
- Según la necesidad de limpieza utilice un paño seco, una mezcla de agua y jabón o alcohol isopropílico.
- Para rodamientos y correderas se debe usar una brocha o pincel grueso. En ningún caso se debe agregar agentes lubricantes a las piezas móviles.

Exterior del producto

- Según la necesidad de limpieza utilice un paño seco y una mezcla de agua y jabón o alcohol isopropílico.

Accesorios plásticos

- Para garantizar la integridad del accesorio limpie con un paño humedecido en agua y jabón realizando movimientos lineales rectos.
- Seque con paño suave.
- Nunca limpie con productos abrasivos o solventes.



Colombia

Dirección: Cra 6 #115-65

C.C. Hacienda Santa Bárbara, Zona F, Of 506 - Bogotá

Email: servicioalcliente@tecnosalud.com.co

Teléfono: (601) 3902968

Celular: (317) 6354439



TECNOSALUD

en soluciones para
Farmacias y Hospitales