

Manual de uso

The word "hydros" is written in a white, lowercase, sans-serif font. It is centered within a teal-colored rounded rectangle that has a slight gradient and a soft shadow.

hydros

Manejo de Líquidos



TECNOSALUD
EXPERTOS en soluciones para
Farmacias y Hospitales



Cuando use nuestros equipos es importante prevenir el riesgo de accidentes y lesiones personales. Siga estas recomendaciones básicas de seguridad y siempre aplique el sentido común.

- Asegúrese de leer y entender las instrucciones en su totalidad antes de utilizar el equipo.
- Guarde este manual, podrá serle de utilidad en un futuro.
- Haga caso de las indicaciones que incluyen los equipos.
- No opere ningún equipo que evidencie un mal funcionamiento o que presente daños en sus partes, comuníquese con el servicio técnico de Tecnosalud de inmediato.
- Si el equipo cuenta con ruedas, mantenga el freno activado. Libérela solo al momento del desplazamiento.
- Si va a desplazar el equipo, active y verifique el bloqueo de los seguros correspondientes a partes móviles.
- Mantenga atención sobre los movimientos efectuados por los productos, hacerlo de forma desatendida puede ocasionar lesiones
- No modifique, ni intente reparar ninguna de las piezas del equipo.
- Nunca intente subirse total o parcialmente sobre un equipo.
- Tenga siempre presentes las cargas máximas permitidas por los equipos.
- Nunca permita que los equipos sean operados por niños.
- No ubique los equipos a la intemperie.
- No exponga los equipos a altas temperaturas, luz solar directa o humedad extrema.
- Utilice el equipo únicamente para darle el uso para el que fue creado.



Carga máxima por entrepaño hydros rio

La carga máxima de los entrepaños en este producto es de 25kg. Nunca exceda este límite.

Desplazamiento del equipo

Con ambas manos, sostenga firmemente la estructura de aluminio del equipo en la posición más cómoda para su altura. Asegúrese de que el bloqueo de las ruedas ha sido liberado antes de empezar a desplazar el equipo.



Bloqueo de Ruedas

Sostenga el equipo firmemente con ambas manos y utilice el pie para presionar el pedal ubicado en la parte superior de la rueda. Asegúrese de bloquear ambas ruedas antes de soltar el equipo. Para quitar el bloqueo, presione el pedal bloqueado mientras sostiene firmemente el equipo.



Manipulación de los contenedores hydros

Con ambas manos, sostenga firmemente el contenedor tomándolo de sus extremos. Nunca exceda la carga máxima de 25kg por contenedor.





Carga máxima por entrepañó hydros Delta

La carga máxima de los entrepaños en este producto es de 50kg. Nunca exceda este límite.

Descripción Sistema

El sistema de rieles en el hydros rio permite que los contenedores permanezcan en su sitio durante los desplazamientos y facilitan el traspaso seguro de contenedores entre este y el hydros delta. Alinee el hydros rio con el hydros delta orientando la apertura del contenedor hacia afuera y empuje el contenedor hacia el hydros delta hasta que este choque con el tope posterior. En caso de querer extraer un contenedor hacia el hydros rio, ejecute el mismo proceso pero hale el contenedor a travez del hydros rio hasta que este encaje con el tope frontal en sus rieles.



Alinee el HYDROS RIO con el HYDROS DELTA.



Acerque el HYDROS RIO al HYDROS DELTA y bloquee las ruedas.



Hale los contenedores hacia el HYDROS RIO o empujelos hacia el HYDROS DELTA según la necesidad.

Limpieza

Interior del producto

- Realice la limpieza de cada cajón o entrepaño individualmente.
- Utilice un paño seco.
- Según la necesidad de limpieza utilice un paño seco, una mezcla de agua y jabón o alcohol isopropílico.
- Para rodamientos y correderas se debe usar una brocha o pincel grueso. En ningún caso se debe agregar agentes lubricantes a las piezas móviles.

Exterior del producto

- Según la necesidad de limpieza utilice: un paño seco y una mezcla de agua y jabón o alcohol isopropílico.

Accesorios plásticos

- Para garantizar la integridad del accesorio limpie con un paño humedecido en agua y jabón realizando movimientos lineales rectos.
- Seque con paño suave.
- Nunca limpie con productos abrasivos o solventes.



Colombia

Dirección: Cra 6 #115-65

CC. Hacienda Santa Bárbara, Zona F, Of 506 - Bogotá

Email: servicioalcliente@tecnosalud.com.co

Teléfono: (601) 3902968

Celular: (317) 6354439



TECNOSALUD
en soluciones para
EXPERTOS Farmacias y Hospitales