

Manual de uso

MACH

Dispensación Masiva



TECNOSALUD

EXPERTOS en soluciones para
Farmacias y Hospitales



Cuando use nuestros equipos es importante prevenir el riesgo de accidentes y lesiones personales. Siga estas recomendaciones básicas de seguridad y siempre aplique el sentido común.

- Asegúrese de leer y entender las instrucciones en su totalidad antes de utilizar el equipo.
- Guarde este manual, podrá serle de utilidad en un futuro.
- Haga caso de las indicaciones que incluyen los equipos.
- No opere ningún equipo que evidencie un mal funcionamiento o que presente daños en sus partes, comuníquese con el servicio técnico de Tecnosalud de inmediato.
- Si el equipo cuenta con ruedas, mantenga el freno activado. Libérela solo al momento del desplazamiento.
- Si va a desplazar el equipo, active y verifique el bloqueo de los seguros correspondientes a partes móviles.
- Mantenga atención sobre los movimientos efectuados por los productos, hacerlo de forma desatendida puede ocasionar lesiones
- No modifique, ni intente reparar ninguna de las piezas del equipo.
- Nunca intente subirse total o parcialmente sobre un equipo.
- Tenga siempre presentes las cargas máximas permitidas por los equipos.
- Nunca permita que los equipos sean operados por niños.
- No ubique los equipos a la intemperie.
- No exponga los equipos a altas temperaturas, luz solar directa o humedad extrema.
- Utilice el equipo únicamente para darle el uso para el que fue creado.

MACH PLUS



MACH MINI



Carga máxima por entrepaño

La carga máxima de los entrepaños en este producto es de 8kg. Nunca exceda este límite.

Bloqueo de Ruedas

Sostenga el equipo firmemente con ambas manos y utilice el pie para presionar el pedal ubicado en la parte superior de la rueda. Asegúrese de bloquear ambas ruedas antes de soltar el equipo. Para quitar el bloqueo, presione el pedal bloqueado mientras sostiene firmemente el equipo.



Desplazamiento del equipo

Con ambas manos, sostenga firmemente la estructura de aluminio del equipo en la posición más cómoda para su altura. Asegúrese de que el bloqueo de las ruedas ha sido liberado antes de empezar a desplazar el equipo.




Extracción de Bandejas

Para extraer la bandeja, levante levemente el frente de la misma y sostengala mientras le permite caer hasta la posición de bloqueo.



Configuración de divisiones

Encaje la división en el borde posterior del entrepaño en una posición cercana al ancho que esté intentando darle al compartimento y ajuste el tamaño al encajar la división en el borde frontal.

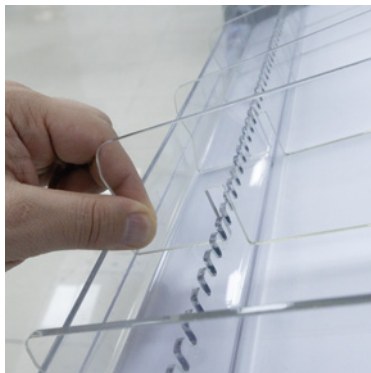

Organización de Inventario

1. Para realizar una carga frontal de producto en el equipo, introduzca uno a uno los productos que quiere almacenar empujando suavemente el producto en la posición inicial con el nuevo producto.
2. Para realizar una carga con bandeja extraída, extraiga la bandeja como se explicó previamente e introduzca los productos en el compartimento correspondiente.
3. Para realizar una carga posterior, identifique el compartimento a cargar e introduzca en él los elementos que desea almacenar, permitiéndoles deslizarse por la superficie del entrepaño.



Funcionamiento

Tome cualquier producto en la parte frontal del entrepaño y los productos restantes llegarán automáticamente a ocupar su lugar en la fila de dispensación.



Limpieza

Interior del producto

- Realice la limpieza de cada cajón o entrepaño individualmente.
- Según la necesidad de limpieza utilice un paño seco, una mezcla de agua y jabón o alcohol isopropílico.
- Para rodamientos y correderas se debe usar una brocha o pincel grueso. En ningún caso se debe agregar agentes lubricantes a las piezas móviles.

Exterior del producto

- Según la necesidad de limpieza utilice un paño seco y una mezcla de agua y jabón o alcohol isopropílico.

Accesorios plásticos

- Para garantizar la integridad del accesorio limpie con un paño humedecido en agua y jabón realizando movimientos lineales rectos.
- Seque con paño suave.
- Nunca limpie con productos abrasivos o solventes.



Colombia

Dirección: Cra 6 #115-65

C.C. Hacienda Santa Bárbara, Zona F, Of 506 - Bogotá

Email: servicioalcliente@tecnosalud.com.co

Teléfono: (601) 3902968

Celular: (317) 6354439



TECNOSALUD
en soluciones para
EXPERTOS Farmacias y Hospitales