

Manual de uso

MARATON

Transporte intrahospitalario




TECNOSALUD
EXPERTOS en soluciones para
Farmacias y Hospitales



Cuando use nuestros equipos es importante prevenir el riesgo de accidentes y lesiones personales. Siga estas recomendaciones básicas de seguridad y siempre aplique el sentido común.

- Asegúrese de leer y entender las instrucciones en su totalidad antes de utilizar el equipo.
- Guarde este manual, podrá serle de utilidad en un futuro.
- Haga caso de las indicaciones que incluyen los equipos.
- No opere ningún equipo que evidencie un mal funcionamiento o que presente daños en sus partes, comuníquese con el servicio técnico de Tecnosalud de inmediato.
- Si el equipo cuenta con ruedas, mantenga el freno activado. Libérela solo al momento del desplazamiento.
- Si va a desplazar el equipo, active y verifique el bloqueo de los seguros correspondientes a partes móviles.
- Mantenga atención sobre los movimientos efectuados por los productos, hacerlo de forma desatendida puede ocasionar lesiones
- No modifique, ni intente reparar ninguna de las piezas del equipo.
- Nunca intente subirse total o parcialmente sobre un equipo.
- Tenga siempre presentes las cargas máximas permitidas por los equipos.
- Nunca permita que los equipos sean operados por niños.
- No ubique los equipos a la intemperie.
- No exponga los equipos a altas temperaturas, luz solar directa o humedad extrema.
- Utilice el equipo únicamente para darle el uso para el que fue creado.

MARATON PLUS

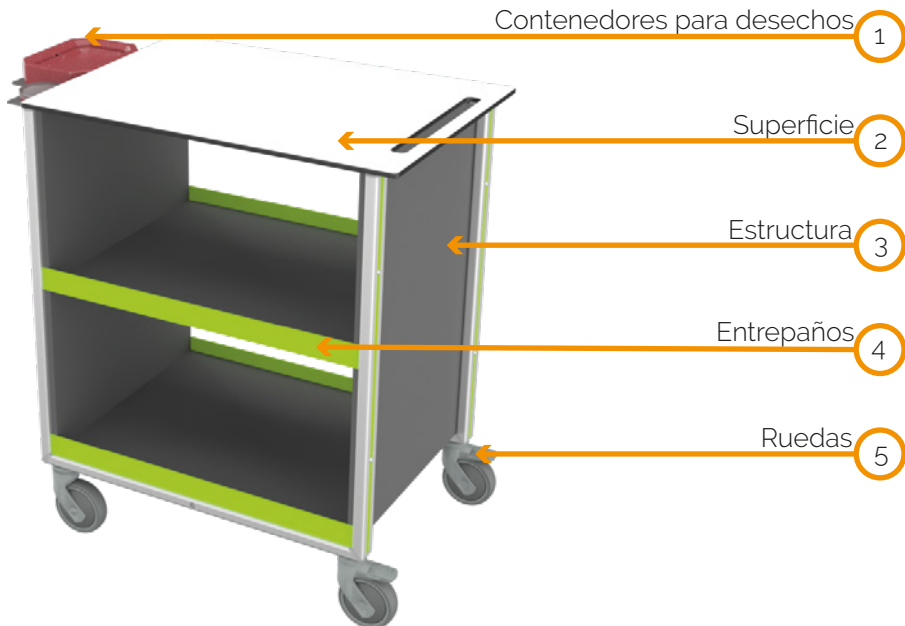

Carga máxima por entrepaño MARATÓN PLUS

La carga máxima de los entrepaños en este producto es de 25kg. Nunca exceda este límite.

Desplazamiento del equipo

Con ambas manos, sostenga firmemente el carro por el mango integrado en la superficie del equipo. Asegúrese de que el bloqueo de las ruedas ha sido liberado antes de empezar a desplazar el equipo.



Bloqueo de Ruedas

Sostenga el equipo firmemente con ambas manos y utilice el pie para presionar el pedal ubicado en la parte superior de la rueda. Asegúrese de bloquear ambas ruedas antes de soltar el equipo. Para quitar el bloqueo, presione el pedal bloqueado mientras sostiene firmemente el equipo.




Guardián y contenedor para residuos biológicos

En el costado opuesto al mango del carro, encontrará el soporte para el guardián y el contenedor de residuos biológicos. Introdúzcalos por la parte superior del soporte en su cavidad correspondiente.



MARATON UNIDOSIS

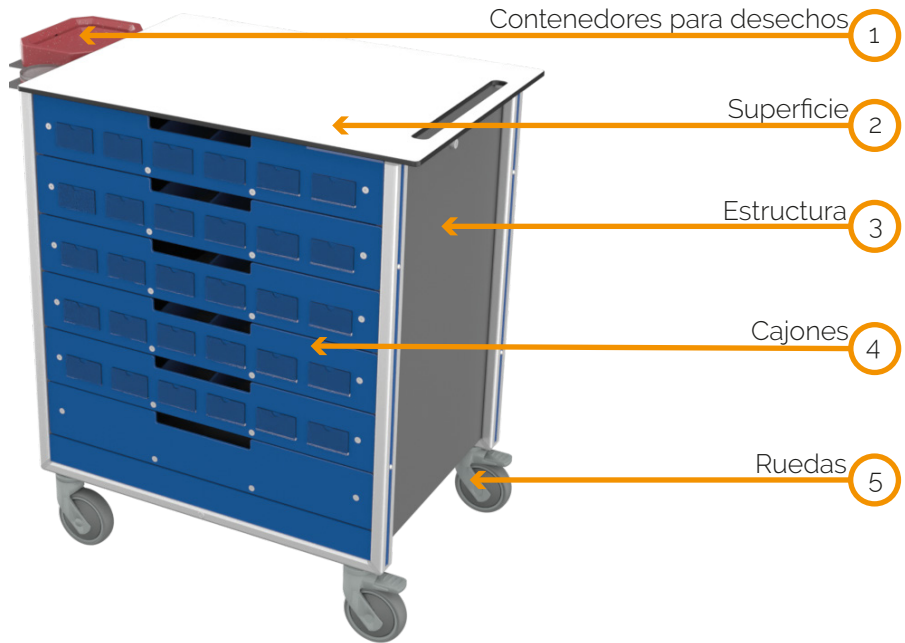


Cargas máximas MARATÓN UNIDOSIS

Cada cajón soporta hasta 30kg de peso, sin embargo, la carga máxima del carro es de 100kg. Nunca exceda este límite.

Sistema de bloqueo general para cajones

Debajo del mango encontrará el cerrojo para el sistema de bloqueo general del MARATÓN UNIDOSIS. Con todos los cajones cerrados, introduzca la llave y rotela para engranar el bloqueo. Verifique que los cajones quedaran bloqueados.

MARATÓN PAROS

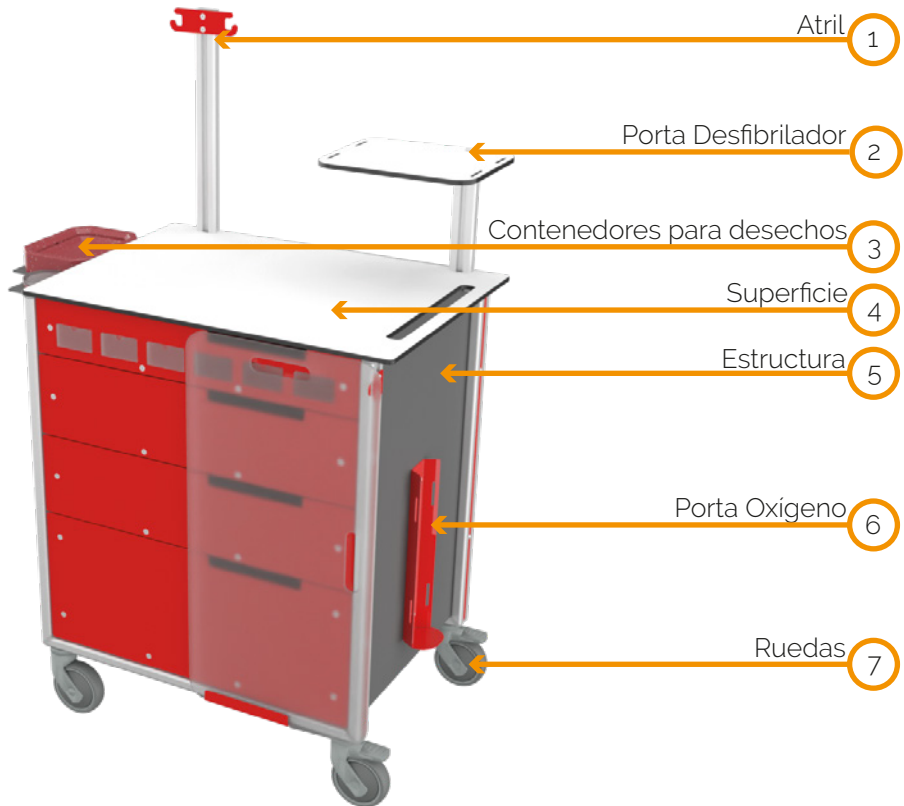

Cargas máximas MARATÓN PAROS

Cada cajón soporta hasta 30kg de peso, sin embargo, la carga máxima del carro es de 100kg. Nunca exceda este límite.

Tabla de reanimación y control de acceso

La tabla de reanimación está ubicada de tal forma que evita el acceso a los cajones del MARATÓN PAROS. En caso de emergencia rompa el candado hospitalario que bloquea el sistema halando la tabla de reanimación. Para reubicarla, encajela nuevamente en los espacios designados y ponga un nuevo candado hospitalario.



Atril

Cuelgue las bolsas de líquidos que serán utilizadas en las endiduras del soporte horizontal del atril.

Soporte para desfibrilador

Coloque el desfibrilador en el soporte correspondiente y átelo firmemente con las cintas de velcro .

Limpieza

Interior del producto

- Realice la limpieza de cada cajón o entrepaño individualmente.
- Según la necesidad de limpieza utilice un paño seco, una mezcla de agua y jabón o alcohol isopropílico.
- Para rodamientos y correderas se debe usar una brocha o pincel grueso. En ningún caso se debe agregar agentes lubricantes a las piezas móviles.

Exterior del producto

- Según la necesidad de limpieza utilice un paño seco y una mezcla de agua y jabón o alcohol isopropílico.

Accesorios plásticos

- Para garantizar la integridad del accesorio limpie con un paño humedecido en agua y jabón realizando movimientos lineales rectos.
- Seque con paño suave.
- Nunca limpie con productos abrasivos o solventes.



Colombia

Dirección: Cra 6 #115-65

C.C. Hacienda Santa Bárbara, Zona F, Of 506 - Bogotá

Email: servicioalcliente@tecnosalud.com.co

Teléfono: (601) 3902968

Celular: (317) 6354439



TECNOSALUD
EXPERTOS en soluciones para
Farmacias y Hospitales