

Manual de uso

ATLAS

Almacenamiento técnico




TECNOSALUD
EXPERTOS en soluciones para
Farmacias y Hospitales




Cuando use nuestros equipos es importante prevenir el riesgo de accidentes y lesiones personales. Siga estas recomendaciones básicas de seguridad y siempre aplique el sentido común.

- Asegúrese de leer y entender las instrucciones en su totalidad antes de utilizar el equipo.
- Guarde este manual, podrá serle de utilidad en un futuro.
- Haga caso de las indicaciones que incluyen los equipos.
- No opere ningún equipo que evidencie un mal funcionamiento o que presente daños en sus partes, comuníquese con el servicio técnico de Tecnosalud de inmediato.
- Si el equipo cuenta con ruedas, mantenga el freno activado. Libérela solo al momento del desplazamiento.
- Si va a desplazar el equipo, active y verifique el bloqueo de los seguros correspondientes a partes móviles.
- Mantenga atención sobre los movimientos efectuados por los productos, hacerlo de forma desatendida puede ocasionar lesiones
- No modifique, ni intente reparar ninguna de las piezas del equipo.
- Nunca intente subirse total o parcialmente sobre un equipo.
- Tenga siempre presentes las cargas máximas permitidas por los equipos.
- Nunca permita que los equipos sean operados por niños.
- No ubique los equipos a la intemperie.
- No exponga los equipos a altas temperaturas, luz solar directa o humedad extrema.
- Utilice el equipo únicamente para darle el uso para el que fue creado.
- Realice toda limpieza del equipo con un paño limpio de ser necesario una limpieza más profunda utilice una mezcla de agua y jabón no abrasivo


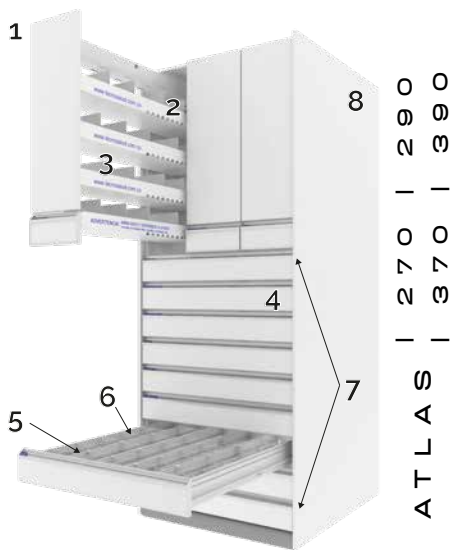


1. Gavetas
2. Calles de Gaveta
3. Divisiones de Gaveta
4. Seguro de Trinquete
5. Laterales

1. Extraíbles
2. Bandejas de Extraíble
3. Divisiones de Extraíble
4. Gavetas
5. Calles de Gaveta
6. Divisiones de Gaveta
7. Seguro de Trinquete
8. Laterales

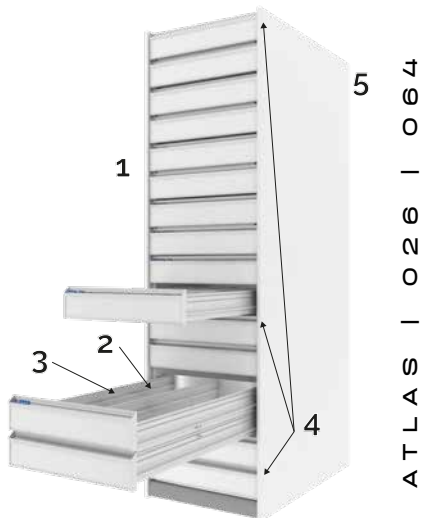

1. Extraíbles
2. Bandejas de Extraíble
3. Laterales

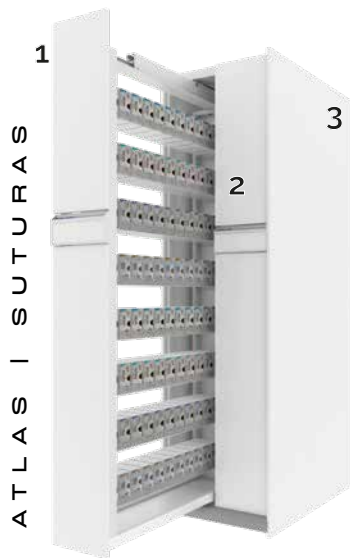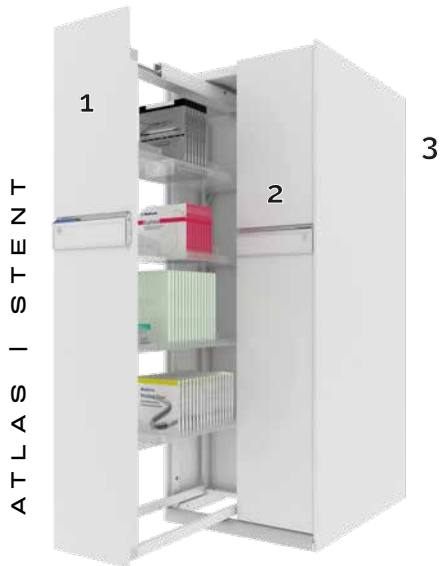


1. Extraíbles
2. Bandejas de Extraíble
3. Laterales

ATLAS | CATÉTERES



1. Extraíbles
2. Bandeja de Goteo
3. Soportes de Endoscopio

1

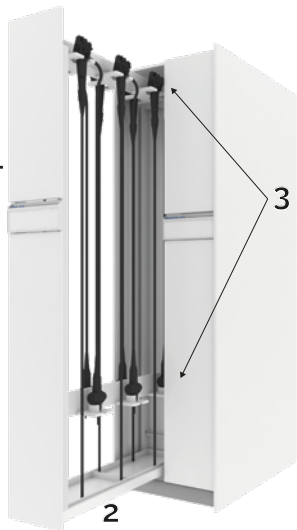

ATLAS | ENDOSCOPIOS

1. Extraíbles
2. Ganchera de Catéteres
3. Laterales



Extraíbles

Los productos ATLAS pueden incluir 2 o 3 extraíbles, cada uno con una base fija y múltiples bandejas removibles (según modelo). Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones al manipular los extraíbles:

- La carga máxima de cada extraíble es de **56kg**, este límite está impreso y puede ser referenciado en cada extraíble. No exceda este límite de peso.
- Evite siempre que haya más de un extraíble abierto.
- Al momento de cerrar un extraíble, permita que el mecanismo de cerrado automático actúe por su cuenta. Mantenga sus manos alejadas del mecanismo.
- No se suspenda de los extraíbles ni se apoye en ellos.

Gavetas

- La carga máxima de cada gaveta es de **25kg**. No exceda este límite de peso.
- Evite siempre que haya más de una gaveta abierta.
- Al momento de cerrar una gaveta, permita que el mecanismo de cerrado automático actúe por su cuenta. Mantenga sus manos alejadas del mecanismo.
- No se apoye en las gavetas. Bajo ninguna circunstancia utilice las gavetas como escalón para intentar alcanzar las bandejas superiores.



Obstrucciones

Dado el caso que se produzca una obstrucción los pasos recomendados para solucionarla son:

1. Abra la gaveta inferior.
2. Ubique y presione hacia abajo los seguros de trinquete.
3. Sosteniendo firmemente la gaveta desde los costados (incluyendo las correderas), retire cuidadosamente la gaveta hacia el frente hasta que esta salga completamente.
4. Abra las gavetas superiores necesarias para liberar el bloqueo.
5. Retire el objeto causante de la obstrucción.
6. Repita los pasos en el sentido contrario para reubicar la gaveta y **asegúrese de cerrar los seguros de trinquete una vez finalizado el proceso.**
7. Realice una prueba para comprobar el funcionamiento del bloqueo.

Retiro de Gaveta

Início



Fin

Limpieza

Área inferior al producto

- Abra la gaveta inferior.
- Ubique y presione hacia abajo los seguros de trinquete.
- Sosteniendo firmemente la gaveta desde los costados (incluyendo las correderas), retire cuidadosamente la gaveta hacia el frente hasta que esta salga completamente.
- Realice la limpieza necesaria.
- Repita los pasos en el sentido contrario para reubicar la gaveta.

Interior del producto

- Realice la limpieza de cada gaveta y extraíble individualmente.
- Utilice de un paño seco.
- Según la necesidad de limpieza utilice un paño seco, una mezcla de agua y jabón o alcohol isopropílico.
- Para rodamientos y correderas se debe usar una brocha o pincel grueso. En ningún caso se debe agregar agentes lubricantes a las piezas móviles.

Exterior del producto

- Según la necesidad de limpieza utilice: un paño seco, una mezcla de agua y jabón o alcohol isopropílico.

Accesorios plásticos

- Para garantizar la integridad del accesorio limpie con un paño humedecido en agua y jabón realizando movimientos lineales rectos.
- Seque con paño suave.
- Nunca limpie con productos abrasivos o solventes.

Divisiones de gavetas

- Para insertar: Alinee la división con el perfil de aluminio y ejerza presión directamente hacia abajo.
- Para retirar: Intente darle espacio a la división si esta no lo tiene. Luego gírela hacia arriba. Si no puede darle espacio a la división, hale firmemente hacia arriba. Necesitará hacer más fuerza, pero esta saldrá sin problema.
- Para destlizarlas: Sosteniendo la división cerca al punto de soporte, hálala o empujela suavemente.



Consulte este video para entender y referenciar el uso.

Colombia

Dirección: Cra 6 #115-65

CC. Hacienda Santa Bárbara, Zona F, Of 506 - Bogotá

Email: servicioalcliente@tecnosalud.com.co

Teléfono: (601) 3902968

Celular: (317) 6354439



TECNOSALUD

EXPERTOS en soluciones para
Farmacias y Hospitales